

モニターを目的とした

受付中!

期間・台数限定の商品販売です。

新しく登場する **e-Q**〈イーキュウ〉のモニターを実施いたします。

※詳細につきましては、お気軽にお問い合わせください。

ご注文については
裏面をご覧ください。

※ **e-Q**〈イーキュウ〉商品は医療機器ではありません。



クリーンな温熱施術

e-Q 〈イーキュウ〉

ワンクリックで瞬時に快適な熱刺激が可能。煙が出ず、匂いがしないクリーンな温熱施術に便利な温熱器です。先端部約7mmで安定した刺激を圧痛点・反応点へ。

2010年 全日本鍼灸学会〈大阪〉
明治国際医療大学 篠原先生に学会発表いただいております。



ワンクリックで瞬間温熱と光が出ます。



本体にフックが付いているのでベルトに装着できます。

※『単三形アルカリ乾電池』4本使用(使用回数:約1000回)

※写真は試作品のもので、モニター販売させていただく商品とは外観が多少異なります。

使用方法の一例


〈直接 温熱刺激温度〉

- 低温(47℃)…1回約5秒間
または
- 中温(51℃)…1回約2.5秒間
圧痛点へ少しずらしながら3回クリック。



〈間接 温熱刺激温度〉


- 高温(60℃)…1回約3秒間
- [専用パッチ+よもぎエキス]のコンビネーション施術専用温度です。
パッチの上から、圧痛点へ少しずらしながら3回クリック。(目安)

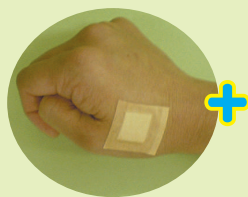

専用パッチ



よもぎエキス

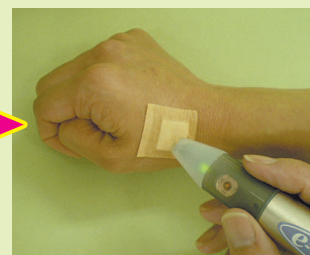

※高温設定での直接 温熱刺激温度としては、使用しないでください。火傷が生じます。

科学で健康を考えるメディカルシステム

販売元 **株式会社 チュウオー**

〒665-087
兵庫県宝塚市中筋1-9-32

お問い合わせ先 フリーダイヤル **0120-013-579**